



**エヌエス** 製品総合案内

CLEAN & DISPOSABLE



# NS CLEAN & DISPOSABLE

## 機能性とコストパフォーマンスを追求した日昭商品

カップ類	目的に合わせて選べる豊富なサイズと種類
ガウン	高いバリア性を誇るガウン
キャップ	機能性とコストパフォーマンスを追及
マスク	優れた肌ざわり・フィット感・バリア性
不織布製品	ソフトで肌ざわりの良い不織布素材を使用
防水シート	吸水性と防水性に優れた高機能ディスポーザブルシート
エプロン	防水性に優れた使い捨てポリエチレン製エプロン
グローブ	感染防止に適した安心の品質
レントゲンカバー	バリア性に優れた使い捨てレントゲンカバー
ディスポトレー	感染対策と省力化に適したディスポトレーシリーズ
ペーパータオル	吸水性とコストパフォーマンスを重視
減菌バッグ	優れた強度・ピール性・無菌性で減菌作業をサポート
ユニガーゼ	肌にやさしい、柔らかな不織布ガーゼ
メモリアルケープ	機能性に優れたプラスチック製ディスポーザブル洗髪用ケープ
清拭用タオル	使いやすさと衛生面を追求したディスポーザブルタオル
食事用エプロン	使い捨てタイプの食事用エプロン
ワンタッチトイレトペーパー	片手で操作できるトイレトペーパー
着吸水シート	手術室や医療現場の床面汚水を防止するシート

# ハルンカップ®/メジャーカップ 豊富なサイズと種類

**ハルンカップ** ハルンカップ®は日昭産業(株)採尿カップの商標です。



① ラミ



② ペパーミント



③ ハルンボーイ



④ Aタイプ グリーン



⑤ K-200

商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	包装	蓋
①01001	210	73×51×79	2,000	80×25箱	裏面B
②01005	210	73×51×79	2,500	100×25箱	裏面B
③01007	210	73×51×79	2,500	100×25箱	裏面B
④01008	210	73×51×79	2,500	100×25箱	裏面B
⑤05006	210	73×51×79	2,500	100×25箱	裏面B

日昭産業(株)は世界で初めてディスポーザブル採尿カップを開発・発売いたしました。

混濁マーク

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底辺(φ)×高さ  
蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)

## メジャーカップ



① K-80



② M-250



③ M-300



④ M-400



⑤ K-400



⑥ M-480



⑦ M-500



⑧ SI-1000B

商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	包装	蓋
①02009	80	56×40×55	3,000	50×60袋	なし
②02010	270	77×53×92	2,500	100×25箱	なし
③02011	360	83×51×117	1,500	50×30箱	なし
④02002	420	83×51×131	1,000	50×20箱	なし

商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	包装	蓋
⑤02105	420	80×51×130	1,500	50×30袋	なし
⑥02004	494	89×60×127	1,000	50×20袋	なし
⑦02003	500	100×66×109	1,000	50×20箱	裏面E
⑧07025	1044	109×155×89	500	25×20袋	なし

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底辺(φ)×高さ  
蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)

# 減菌済カップ 電子線減菌済



①減菌済カップ200 蓋なし



②減菌済カップ200 蓋なし



③減菌済カップ200 蓋なし



④減菌済カップ200 蓋なし

商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	包装
①07040	210	73×51×79	100	1×100袋
②07041	210	73×51×79	80	1×80袋

商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	包装
③07042	360	83×51×117	100	1×100袋
④07045	500	100×66×109	50	1×50袋

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底辺(φ)×高さ

## カップディスペンサー



①



②



③



④ ⑤

カップを衛生的に保管でき、ボタン押しで手軽にカップを1個ずつ出せます。

商品名 (M-400・M-480用)	商品コード	本体サイズ(cm)
①カップディスペンサー M-400用	16031	15.5×18.0×55.0
②カップディスペンサー M-480用	16032	16.0×18.0×53.0

対応カップ：M-400、M-480専用

入数：1台

付属品：取り付け用背面版+マグネット・ネジ

最大収納カップ数量：約60個

商品名 (3オンス・5オンス・7オンス)	商品コード	本体サイズ(cm)
③カップディスペンサー CD-3DB	16006	12.7×13.5×41.0
④カップディスペンサー CD-5DB	16007	14.3×16.0×43.0
⑤カップディスペンサー CD-7DB	16008	

対応カップ：3オンス用(90cc)、5オンス用(150cc)、7オンス用(210cc)

入数：1台

付属品：取り付け用背面版+マグネット・ネジ


最大収納カップ数量：約60個

## カップ用 蓋類



品名	コード	入数	包装
A 71φ蓋	06001	2,000	100×20袋
B 73φ蓋	06002	2,000	100×20袋
C 83φ蓋	06003	3,000	100×30袋
D 88φ蓋	06005	2,500	100×25袋
E 100φ蓋	06006	2,500	100×25袋

## プラスチックカップ (目盛付)

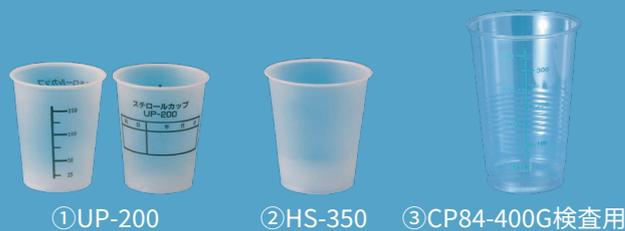

品名	容量・サイズ(mm)	入数・包装	蓋
①03000	200cc・70×50×83	3,000 100×30袋	上記A
②03004	360cc・86×56×99	1,000 50×20袋	なし
③03001	421cc・83×58×122	1,000 50×20袋	なし

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# ドリンクカップ

## ドリンクカップ

①5オンス  
リーフ



②5オンス  
ファンアニマル



③5オンス  
チワワカップ



④7オンス  
セブンリーフ



⑤SM-70 白



⑥3オンス  
ホワイト



⑦5オンス  
ホワイト



⑧7オンス  
ホワイト



⑨8オンス  
スノーホワイト厚紙



⑩ホワイトカップ  
H-500



⑪SI-1000T 白

商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	包装
①05103	150	65×46×73	3,000	100×10袋×3箱
②05104	150	65×46×73	3,000	100×10袋×3箱
③05114	150	65×46×73	3,000	100×30箱
④05109	210	73×51×80	2,000	80×25箱
⑤07004	70	56×42×45	3,600	60×60袋
⑥05101	90	56×40×55	3,000	50×60袋

商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	包装
⑦05102	150	65×46×73	3,000	100×10袋×3箱
⑧05107	210	73×51×80	2,000	80×25箱
⑨04016	278	80×52×95	1,000	50×20袋
⑩04019	500	100×66×109	1,000	50×20箱
⑪07024	960	116×92×132	600	600×1袋

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底辺(φ)×高さ

## プラスチックカップ



S-20 薬杯



S-90



N71-150ST



N71-150ST



CP76-275G



CP79-340G



CP84-400G



CP90-545G

商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	包装
①03005	21	43×27×36	5,000	50×100袋
②03012	95	61×40×57	3,000	100×30袋
③03061	193	70×50×75	3,000	100×30袋
④03006	210	70×50×83	3,000	100×30袋

商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	入数	包装
⑤03062	275	77×52×92	2,500	100×25袋
⑥03063	343	79×50×120	1,000	50×20袋
⑦03069	421	83×58×122	1,000	50×20袋
⑧03077	544	90×62×135	500	25×20袋

表中のカップサイズは、上口径(φ)×底辺(φ)×高さ

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS GOWN

## ガウンシリーズ バリア性と着心地に優れたガウン

### アルファアイソレーションガウン /SMSアイソレーションガウン

#### 院内感染標準予防策でのお手伝い

医療従事者を感染から守るとともに、院内での交差感染を防ぎます。



アイソレーションガウンは  
面ファスナータイプです。



アイソレーションガウンⅡ、  
Ⅲ、SMSアイソレーションガ  
ウンは、紐タイプです。

アルファアイソレーションガウンは、撥水性を備えたPPスパンボンド不織布製。SMS アイソレーションガウンは、高いバリア性を備えたSMS製。手首はやさしくフィットするニット素材。アルファアイソレーションガウンⅢは軽量タイプ

商品コード	商品名	色	仕様	入数	包装
51501	アルファアイソレーションガウン	イエロー	面ファスナータイプ	100枚	10枚×10袋
51502		ブルー			
51503		ピンク			
51541	アルファアイソレーションガウンⅡ	イエロー	紐タイプ	100枚	10枚×10袋
51542		ブルー			
51548	アルファアイソレーションガウンⅢ	イエロー	紐タイプ	100枚	10枚×10袋
51549		ブルー			
51555	SMSアイソレーションガウン	イエロー	紐タイプ	100枚	10枚×10袋

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ


# ラミネートガウン

## 院内感染標準予防策でのお手伝い


医療従事者を感染から守るとともに、院内での交差感染を防ぎます。



前面 防水加工あり

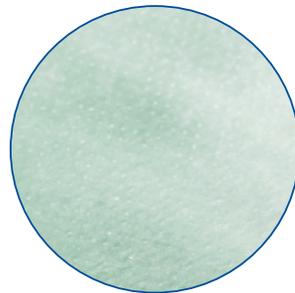

背面 防水加工なし

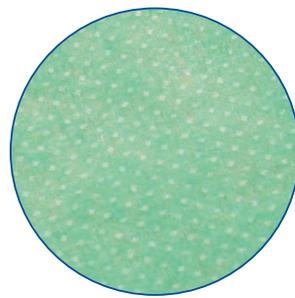

防水加工を施したPP スパンボンド不織布製。通気性を考慮し、背面は防水加工なし。  
多量の体液や液体、薬剤の調剤等の医療従事者への危険性を考慮した製品

## 抗がん剤耐性テスト (ASTM F739-07)

薬剤	濃度	最小透過時間
シスプラチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	480分まで浸透せず
シクロフォスファミド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
ダカルバジン	10.0mg/ml (10,000ppm)	
ドキシソルビジン酸	2.0mg/ml (2,000ppm)	
エトポシド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
フルオロウラシル	50.0mg/ml (50,000ppm)	
パクリタキセル	6.0mg/ml (6,000ppm)	

商品コード	商品名	色	仕様	入数	包装
51546	ラミネートガウン	グリーン	面ファスナータイプ	100枚	10枚×10袋
51547		イエロー			

販売元

**lissho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

NS  
CAP

# キャップシリーズ 機能性とコストパフォーマンスを追求

サージカルキャップ



アルファキャップ



メディカルキャップ



メディカルキャップMC-31



NSダスクャップ



商品コード	商品名	仕様	入数	包装
51571	サージカルキャップ ブルー	紐タイプ	600枚	100枚×6箱
51572	サージカルキャップ グリーン			
51575	サージカルキャップ ブルー Lサイズ			
51595	サージカルキャップB PAD SC-31 ブルー	紐タイプ (汗とりパッド付)	300枚	50枚×6箱
51596	サージカルキャップB PAD SC-41 ブルーL			
51505	アルファキャップ ホワイト AC-10	21インチ	1,000枚	100枚×10箱
51506	アルファキャップ ブルー AC-11			
51507	アルファキャップ グリーン AC-12			
51508	アルファキャップ ピンク AC-13			
51516	アルファキャップ ブルー Lサイズ	24インチ	600枚	100枚×6箱
51576	メディカルキャップ ブルー	ゴムタイプ	600枚	100枚×6箱
51577	メディカルキャップ グリーン			
51578	メディカルキャップ ピンク			
51597	メディカルキャップB PAD MC-31 ブルー	ゴムタイプ (汗とりパッド付)	300枚	50枚×6箱
51518	NSダスクャップ ホワイト	フリーサイズ	1,000本	100本×10袋
51519	NSダスクャップ ブルー			

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# マスクシリーズ

優れた肌ざわり・フィット感・バリア性を実現

## サージカルフェイスマスク

仕様：不織布3層



高性能フィルターを使用したループタイプのサージカルマスク。樹脂製ノーズピースを使用。BFE $\geq$ 99%、PFE $\geq$ 99%、 $\Delta P \leq 2.9\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14731	サージカルフェイスマスク	ホワイト	175×90mm	2,000枚	50枚×40箱
14732		ブルー			
14733		ピンク			
14741	サージカルフェイスマスク・S	ホワイト	145×90mm		
14743		ピンク			

## F99 サージカルマスク

仕様：不織布3層



口元側に肌触りの良い不織布を使用したループタイプのサージカルマスク。よりフィット感のある金属製ノーズピースを使用。BFE $\geq$ 99%、PFE $\geq$ 99%、 $\Delta P \leq 3.3\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14601	F99 サージカルマスク	ホワイト	175×90mm	2,000枚	50枚×40箱
14602		ブルー			
14603		ピンク			
14611	F99 サージカルマスク・S	ホワイト	145×90mm		
14613		ピンク			

## アルファマスク 3P

仕様：不織布3層

日本製



不織布を用いた特殊フィルター使用の3層構造で、高いバリア性を実現。BFE $\geq$ 99%、PFE $\geq$ 99%、 $\Delta P \leq 2.5\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14511	アルファマスク 3P	ホワイト	175×90mm	2,000枚	50枚×10箱×4箱
14512		ブルー			
14513		ピンク			

\*BFE:細菌濾過効率, PFE:微粒子濾過効率,  $\Delta P$ :圧力損失 ; 数値は当社試験データ

### マスクの着用方法

顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。



1 ノーズピースのある方を上にブリーツが上を向いている面を口側にあててください。



2 ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。



3 ノーズピースを鼻の両側で押さえてピッタリとフィットさせてください。




4 下側を引きブリーツを充分伸ばして、鼻からあごまで覆うようにしてください。

## サージカルオペマスク 仕様：不織布3層

## サージカルマスク 3P 仕様：不織布3層



高性能フィルターを使用したリーズナブルなサージカルマスク。  
BFE $\geq$ 99%、PFE $\geq$ 99%、 $\Delta$ P $\leq$ 2.9mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>

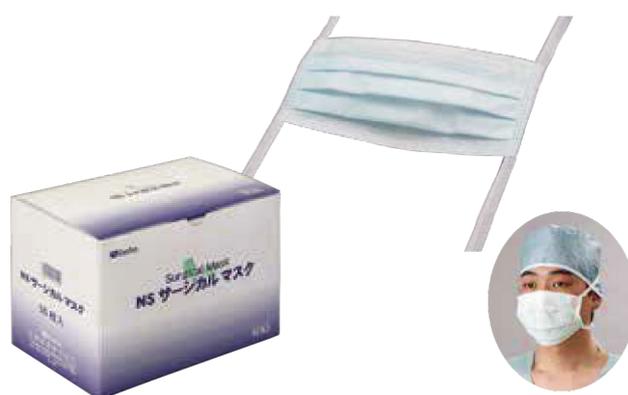

特殊フィルター使用の3層構造で、よりいっそう高いバリア性を実現。  
BFE $\geq$ 99%、PFE $\geq$ 99%、 $\Delta$ P $\leq$ 2.5mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14751	サージカルオペマスク	ホワイト	175×90mm	1,000枚	50枚×20箱
14515	サージカルマスク 3P	ブルー	180×90mm		

## エバーマスクシリーズ

日本製



マスクに最適な濾過構造を有し、除塵力に優れるポリウレタンフォーム特殊処理素材を使用。  
ニューエバーマスクはカイノール活性炭入り防臭マスクで、防臭剤のスペアもご用意しました。

## ペーパーマスク

仕様：紙製2層



2枚重ねフィルターによる高い除塵効果を実現したディスプレイザブルペーパーマスク。

商品コード	商品名	色	仕様	入数	包装
14100	エバーマスク	アイボリー	ポリウレタンフォーム	200枚	1枚袋×50×4箱
14101		ブルー			
14102		ピンク			
14016	ニューエバーマスク (防臭マスク)	ホワイト	カイノール活性炭入	50枚	1枚袋×25×2箱
14019	防臭剤スペアパック	—	カイノール活性炭	50枚	1枚袋×50袋

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14303	ペーパーマスク 2P	ホワイト	195×75mm	5,000枚	100枚×50箱

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS MASK

## NSアイソレーションマスク


高いバリア性とコストパフォーマンスを実現



性能データ：BFE $\geq$ 98%、PFE $\geq$ 98%、 $\Delta P < 4\text{mm H}_2\text{O/cm}$

### 特徴

- 高性能フィルターを使用した不織布3層構造イヤーループタイプのサージカルマスクです
- ソフトな肌ざわりと優れたフィット感で、長時間の使用にも最適です。
- 衛生的なバージンパルプ化粧箱に60枚包装いたしました。

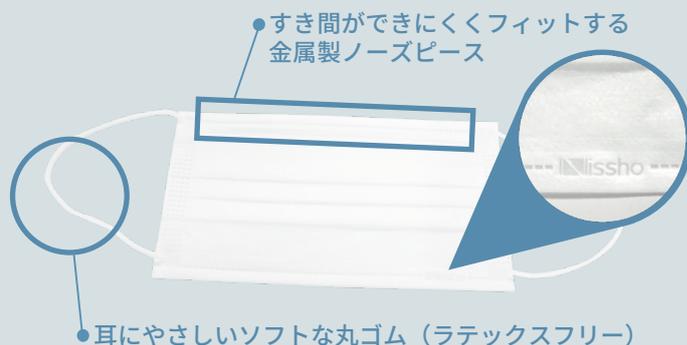

マスクの着用方法 「Nissho」ロゴマークが外側に表示されるように装着してください。



**1**  
ノーズピースのある方を上に、プリーツが上を向いてる面を口側にあててください。



**2**  
ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。



**3**  
ノーズピースを鼻の両側で押さえてピッタリとフィットさせてください。



**4**  
下側を引きプリーツを充分伸ばして、鼻からあごまで覆うようにしてください。

※顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。 ※着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14801	NSアイソレーションマスク	ホワイト	175×90mm	3,000枚	60枚×50箱
14802		ブルー			
14813	NSアイソレーションマスク・S	ピンク	145×90mm		

販売元

**Nissho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS MASK

## NSフェイスマスク

顔への密着性が良く、ジャストフィットするマスク



### 特徴

- 高性能フィルターを使用した不織布3層構造イヤーループタイプのサージカルマスクです。
- マスク両端の溶着形状の工夫によりマスクと顔との密着性が良くなりました。
- 衛生的なバージンパルプ化粧箱に経済的な50枚包装にいたしました。

米国の医療用マスク規格 ASTM F2100-11 レベル1 に適合したサージカルマスク

試験内容	規格値
細菌濾過効率：BFE	> 98%
微粒子捕集効率：PFE	> 98%
圧力損失：ΔP	< 4mmH2O/cm2
延焼	クラス1
人工血液バリア性	80mmHg

マスクの着用方法 「Nissho」ロゴマークが外側に表示されるように装着してください。



**1** ノーズピースのある方を上に、ブリーツが上を向いている面を口側にあててください。



**2** ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。



**3** ノーズピースを鼻の両側で押さえてピッタリとフィットさせてください。



**4** 下側を引きブリーツを充分伸ばして、鼻からあごまで覆うようにしてください。

※顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。 ※着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14851	NSフェイスマスク	ホワイト	175×90mm	3,000枚	50枚×60箱
14852		ブルー			
14853		ピンク			
14861	NSフェイスマスク・S	ホワイト	145×90mm		
14863		ピンク			

販売元

**Nissho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS MASK

## NSアイシールドマスク

液体飛散による汚染防止の様々な用途にご使用いただけます



### 特徴

- 高性能フィルターを使用した不織布3層構造イヤーループタイプのサージカルマスクです。
- マスク両端の溶着形状の工夫によりマスクと顔との密着性が良くなりました。
- 衛生的なバージンパルプ化粧箱に経済的な50枚包装にいたしました。

米国の医療用マスク規格ASTM F2100-11  
レベル3に適合したサージカルマスク

試験内容	規格値
細菌濾過効率：BFE	≥ 98%
微粒子捕集効率：PFE	≥ 98%
圧力損失：ΔP	<5.0mmH2O/cm
人工血液不浸透性	160mmHg
延焼性	80mmHg

### マスクの着用方法

※顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。

※着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。

#### 〈着け方〉

1



シールドの保護不織布を取り外し、中央の凹みに合わせて、ノーズピースを鼻の形に合わせて曲げてください。

2



ノーズピースの折り曲げた部分を鼻にあて、ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。

3



マスク本体の下側を引き、プリーツを十分に伸ばして、あごまで覆うようにしてください。

#### 〈外し方〉



シールド及びマスク本体の外側を触らないようにゴムひもを持って取り外してください。

商品コード	商品名	色	入数	包装
14771	NSアイシールドマスク	ブルー	300枚	50枚×6箱

### 販売元

**nissho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS NON-WOVEN


## 不織布シリーズ ソフトで肌ざわりの良い不織布素材を使用

### アルファトランクス



商品コード	商品名	色	仕様	入数	包装
51510	アルファトランクス フリーサイズ	ダークブルー	丈 55cm	100枚	25枚×4箱
51512	アルファトランクス セミロングサイズ		丈 58cm		
51511	アルファトランクス ロングサイズ		丈 74cm		
51514	アルファトランクス フリー (穴無し)		丈 55cm		
51509	アルファ膀胱鏡トランクス	グリーン	丈 74cm		1枚×100袋
51513	アルファトランクス Mデラックス	丈 55cm			
51536	検査用トランクス SMS	ダークブルー	丈 55cm		25枚×4箱
51538	検査用トランクス SMS ロング		丈 74cm		

### アンギオショーツ

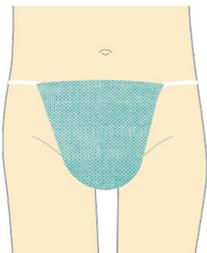

血管造影検査時などに  
患者さんに着用して  
いただくと、羞恥心や不  
安感が軽減できます。  
また、撥水性の不織布  
素材を用いているので、  
薬液をはじきます。

### アルファシューズカバー



強度および撥水性に優れています。(滑り止め加工付)

商品コード	商品名	入数	包装
51585	アンギオ・ショーツ ゴム Mサイズ	200枚	100枚×2箱
51586	アンギオ・ショーツ ゴム Lサイズ	200枚	100枚×2箱
51587	アンギオ・ショーツ ヒモ Mサイズ	200枚	100枚×2箱
51588	アンギオ・ショーツ ヒモ Lサイズ	200枚	100枚×2箱

商品コード	商品名	入数	包装
51521	アルファシューズカバー	200枚	50足×6箱
51522	アルファシューズカバー セミロング	200枚	25足×6箱
51523	アルファシューズカバー ロング	200枚	25足×4箱
51530	NSシューズカバー	200枚 (480枚)	40足×6箱 (80枚)

# アルファウェア

通気性・吸汗性に優れ、肌ざわりも良く、快適に長時間ご使用いただけます。



男性用上着



男性用下着



ジャケット

商品コード	商品名	サイズ	仕様	入数	包装
51642	アルファウェア AW-11	M	男性用上着, 半袖	200枚	10枚×5箱
51643		L			
51644		LL			
51650	アルファウェア AW-13	M	男性用下着 (パンツ)	50枚	10枚×5箱
51651		L			
51652		LL			
51665	アルファウェアジャケット AW-1 JF	—	フリーサイズ	30枚	1枚×30袋

## アルファ検診着



- ソフトな肌ざわりで、爽やかな着用感が得られます。
- 両サイドにスリットがあるので、検診に最適です。
- 男性にも女性にも着用いただけるフリーサイズです。
- 静電気発生を防止する帯電防止処理も施されています。


商品コード	商品名	入数	包装
51566	アルファ検診着 (フリーサイズ)	100枚	1枚×100袋

## アルファ患者着



- 両肩に面ファスナーが付いているので、着脱が簡単におこなえます。
- ソフトな肌ざわりのSMS素材を使用しています。
- 男性にも女性にも着用いただけるフリーサイズです。

商品コード	商品名	入数	包装
51681	アルファ患者着・肩開き (フリーサイズ)	100枚	1枚×100袋

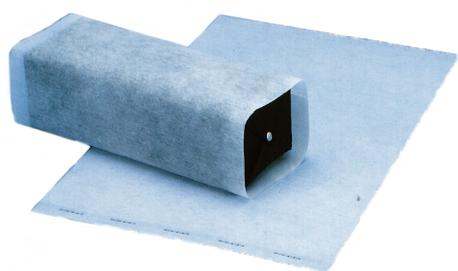

## アルファディスプレイシート

- 肌との直接接触を回避し、患者様の不快感を軽減します。
- 枕カバーとして、また、X線撮影装置に貼付するなど、多目的に使用できます。
- PP スパンボンド不織布製のテープ付ディスプレイシートです。

商品コード	商品名	入数	包装
51531	アルファディスプレイシート	2,000枚	100枚×20袋

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ


## 防水シートシリーズ

吸水性と防水性に優れた高機能ディスプレイシート

### 不織布製防水シート レーヨン不織布 フィルム加工 優れた吸水性 防水性 ソフトな肌触り



レーヨン不織布にフィルム加工を施し、液体の吸水性、防水性に優れています。やわらかな素材を使用しており、肌にやさしくソフトで滑らかです。用途に合わせ、豊富なサイズをご用意しました。

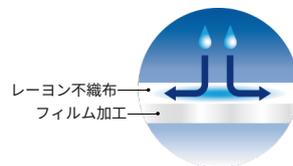

裏面はフィルム加工になっています。



便利なチャック付きポリ袋入りです。

商品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	包装
18106	防水シート 500×600	500×600	500枚	50枚×10袋
18108	防水シート 800×1000	800×1000	200枚	20枚×10袋
18112	防水シート 1000×1200	1000×1200	100枚	10枚×10袋
18115	防水シート 1000×1500	1000×1500	100枚	10枚×10袋
18118	防水シート 1000×1800	1000×1800	100枚	10枚×10袋
18120	防水シート 1000×2000	1000×2000	100枚	10枚×10袋
18125	防水シート 1000×2500	1000×2500	80枚	10枚×8袋
18221	防水シート 1200×2100	1200×2100	80枚	10枚×8袋
18206	防水シート 600×600	600×600	400枚	40枚×10袋
18208	防水シート 600×800	600×800	200枚	20枚×10袋
18218	防水シート 600×1800	600×1800	100枚	10枚×10袋
18224	防水シート 1100×2400	1100×2400	80枚	10枚×8袋
18520	防水ノンスリップシート 800×2100	800×2100	100枚	10枚×10袋
18521	防水ノンスリップシート 1000×2100	1000×2100	100枚	10枚×10袋
18015	ロールシート 303	1000×100m	1巻	1巻
18016	ロールシート 403	1000×100m	1巻	1巻

### アルファシート PPスパンボンド不織布 ラミネート加工 吸水性 防水性



吸水性PPスパンボンド不織布にラミネート加工を施した素材で、液体を吸水し、裏側への浸透を防ぎます。豊富なサイズにより、用途に合わせてご使用できます。



裏面はフィルム加工になっています。



便利なチャック付きポリ袋入りです。



商品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	包装
18706	アルファシート 500×600	500×600	500枚	50枚×10袋
18709	アルファシート 1000×900	1000×900	200枚	10枚×20袋
18712	アルファシート 1000×1200	1000×1200	100枚	10枚×10袋
18715	アルファシート 1000×1500	1000×1500	100枚	10枚×10袋
18718	アルファシート 1000×1800	1000×1800	100枚	10枚×10袋
18720	アルファシート 1000×2000	1000×2000	100枚	10枚×10袋
18725	アルファシート 1000×2500	1000×2500	80枚	10枚×8袋
18821	アルファシート 1200×2100	1200×2100	80枚	10枚×8袋

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

## 紙製防水シート




パルプ100%の原紙にフィルム加工を施し、液体の吸水性、防水性に優れています。  
しなやかで肌触りの良い紙質を使用しています。  
用紙に合わせてカットタイプ、ロールタイプの2種類をご用意しております。



裏面はフィルム加工になっています。



カットタイプ

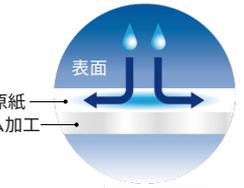

パルプ100%原紙  
フィルム加工



ロールタイプ

商品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	包装
18003	ソフトシート No.11ブルー (カットタイプ)	400×300	2,000枚	2,000枚×10箱
18004	ソフトシート No.21ブルー (ロールタイプ)	370×300×120連	12巻	1巻×12箱
18006	ソフトシート No.22ホワイト (ロールタイプ)	370×300×120連	20巻	1巻×20本
18008	ソフトシート No.24グリーン (ロールタイプ)	370×300×120連	20巻	1巻×20本
18011	ソフトシート No.25ピンク (ロールタイプ)	370×300×120連	20巻	1巻×20本
18013	ソフトシート No.30ホワイト (ロールタイプ)	570×970×100連	4巻	1巻×4本


## 特殊防水シート



2層の吸水不織布、特殊ノンスリップフィルムを用いた製品で  
多量の液体を素早く吸収し、保水性、防水性に優れています。




裏面は特殊ノンスリップフィルム加工になっています。

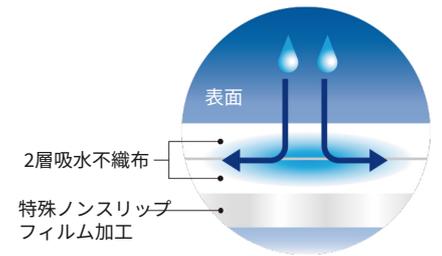

2層吸水不織布  
特殊ノンスリップフィルム加工

商品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	包装
18032	ラミネートシート 480×1900	480×1900	80枚	10袋×8袋
18033	ラミネートシート 900×800	900×800	100枚	10袋×10袋
18035	ラミネートシート 900×1900	900×1900	50枚	5袋×10袋

## ストレッチャーシート

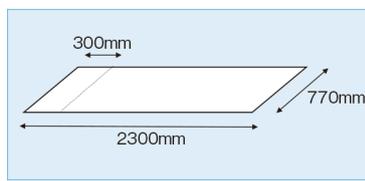

### 特徴

- 表面は、撥水性に優れた不織布を使用し、裏面には防水加工を施し、液体を浸透させません。
- 使い捨てにより患者様への交差感染を防ぎます。
- 清潔にご使用いただけるように個包装となっています。

商品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	包装
18026	ストレッチャーシート	480×1900	80枚	10袋×8袋

## ストレッチャーカバー



### 特徴

- 表面は、吸水性に優れたソフトで肌触りの良いレーヨン不織布を使用しており、多量の液体や血液を素早く吸収します。
- 裏面は、液体を浸透させない《滑り止め加工を施した特殊フィルム》を用いており液漏れを防ぎます。
- カバー両端に取付用ゴムがついており、着脱が簡単に行えます。
- ストレッチャー、ベッド、手術台、診察台等にご使用いただけます。


商品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	包装
18032	ラミネートシート 480×1900	480×1900	80枚	10袋×8袋

# NS SHEET

## 高吸水シートシリーズ

吸水性と保水性に優れた高機能ディスポーザブルシート

### NSアンダーパッド/NSアンダーシート

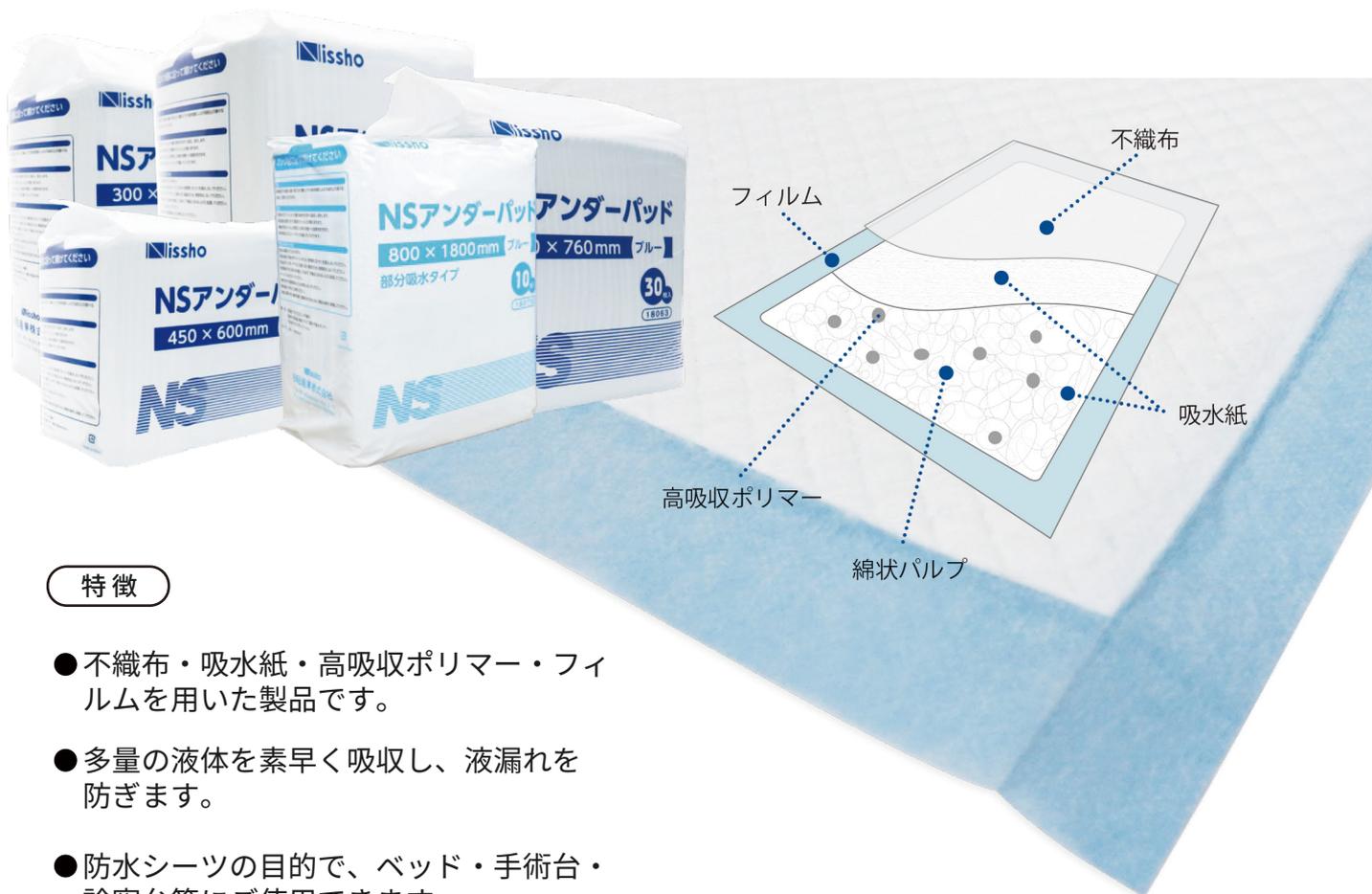

#### 特徴

- 不織布・吸水紙・高吸収ポリマー・フィルムを用いた製品です。
- 多量の液体を素早く吸収し、液漏れを防ぎます。
- 防水シートの目的で、ベッド・手術台・診察台等にご使用できます。
- ボトムシートの色はブルーとホワイトの2色あります。

商品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	吸水量 (目安)
18060	NSアンダーパッド 300×450	300×450	400枚 (50枚×8袋)	300cc
18061	NSアンダーパッド 450×600	450×600	240枚 (40枚×6袋)	650cc
18062	NSアンダーパッド 600×900	600×900	120枚 (30枚×4袋)	1400cc
18063	NSアンダーパッド 760×760	760×760	120枚 (30枚×4袋)	1500cc
18070	NSアンダーパッド 800×1800	800×1800	80枚 (10枚×8袋)	1300cc
18052	NSアンダーシートホワイト 600×900	600×900	100枚 (10枚×10袋)	1200cc
18053	NSアンダーシートホワイト 900×1200	900×1200	50枚 (5枚×10袋)	2400cc
18054	NSアンダーシートホワイト 450×600	450×600	200枚 (50枚×4袋)	600cc

※部分吸水タイプ (吸水部700×760mm)

販売元

**lissho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS APRON

## エプロンシリーズ

防水性に優れた使い捨てポリエチレン製エプロン

### 袖付きエプロン

院内感染標準予防策でのお手伝い

こんな時、こんな部署でお使いください。

#### 特徴

- 血液や体液が飛散する処置、創部の洗浄
- 包交、清拭、オムツ交換
- 内視鏡の洗浄
- 訪問看護、入浴介助

#### 使用部署

病棟、ICU、救急外来、内視鏡室 他



個包装タイプや化粧箱タイプがございます



物質透過性が低いポリエチレン製です。

腰部のひもで身体にフィットします。

#### 手首のタイプは2種類



袖口にゴム素材を使用しています。

袖口は親指が引っかけられる形状になっています。

#### 着脱方法 [例]

##### 【着け方】



1 首の部分を持ってかぶる

2 片腕をエプロンの袖に通す

3 反対の腕をもう片方の袖に通す

4 腰ひもを結ぶ

##### 【外し方】



1 首の部分を持って体の前に強く引き、首ひもを切る

2 ガウンの表側に触れないよう注意し、裏返すようにして脱ぐ

3 ガウンの裏側を持ち、片腕つつ抜く

4 表側が内側になるようにまとめ、体の前方へ強く引き、腰ひもを切り小さくたたんで、廃棄する

商品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	包装
51603	ディスポエプロン ブルー (1枚/袋入り)	全長=112cm	240枚	1枚×60枚×4箱
51604	ディスポエプロン ブルー (10枚/BOX入り)	全長=112cm	200枚	10枚×20箱
51605	ディスポエプロン ブルー L (10枚/BOX入り)	全長=117cm	200枚	10枚×20箱
51610	ディスポエプロン ライト	全長=112cm	300枚	15枚×20箱
51611	ディスポエプロン ライト ピンク	全長=112cm	300枚	20枚×15箱
51615	ディスポエプロン サムフック	全長=112cm	300枚	15枚×20箱
51616	ディスポエプロン サムフック L	全長=117cm	300枚	15枚×20箱

#### 販売元



〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# 袖なしエプロン

「プラスチックエプロン80・ワイド」は肩部の幅が広がっています。

ネック部分のミシン目をカットし襟元の調節が可能です。

物質透過性が低いポリエチレン製です。

腰部のひもで身体にフィットします。

膝下まで覆われるフリーサイズ。

こんな時、こんな部署でお使いください。

## 特徴

- 血液や体液が飛散する処置、創部の洗浄
- 包交、清拭、オムツ交換
- 内視鏡の洗浄
- 訪問看護、入浴介助

## 使用部署

病棟、ICU、救急外来、内視鏡室 他



一枚ずつ取り出せる化粧箱入りです。



袖なしエプロン装着時に便利なアームカバー




## 着脱方法【例】

### 【着け方】




1 首の部分を持ってかぶる

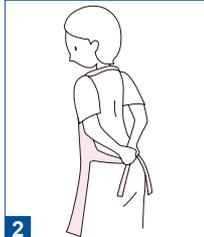

2 腰ひもを後ろで結ぶ

### 【外し方】

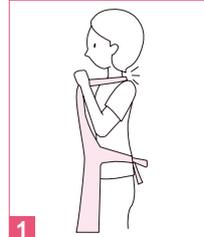

1 首の部分を持って体の前に強く引き、首ひもを切る



2 表側が内側になるように腰ひもの高さで2つに折り、表側に触れないよう裾をすくい上げる



3 表側が内側になるようまとめる



4 体の前方へ強く引いて腰ひもを切り、表側に触れないよう注意しながら、廃棄する

商品コード	商品名	色	仕様	入数	包装
51600	アームカバー	—	長さ：40cm	200枚	50枚×4袋
51602	不織布エプロン	ホワイト	不織布・袖無	100枚	1枚×100袋
51606	アルファエプロン	ホワイト	全長=130cm	600枚	50枚×12箱
51607		ピンク			
51608	プラスチックエプロン80・ワイド	ブルー	全長=120cm	960枚	80枚×12箱
51621		ホワイト			
51622	プラスチックエプロン80	ピンク	全長=120cm	960枚	80枚×12箱
51623		ブルー			
51626	プラスチックエプロン80	ホワイト	全長=120cm	960枚	80枚×12箱
51627		ピンク			
51628		ブルー			

## 販売元



〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
 ヒューリック神谷ビル4階  
 TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
 (土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS GLOVE

## プラスチックグローブ

感染防止に適した安心の品質

### ハンドケアグローブ



### ソフトフィールグローブ



### スーパーマイルドグローブ



- 指先までよくフィットし、細やかな作業に適しています。
- サイズの違いが見分け易いように箱の色をわけています



長さ：230mm以上

商品コード	商品名	サイズ	パウダー	入数	包装
19160	ハンドケアグローブ	SS	無	1,000枚	100枚×10箱
19161		S			
19162		M			
19163		L			
19164		LL			
19135	ソフトフィールグローブ	SS	無	2,000枚	100枚×20箱
19136		S			
19137		M			
19138		L			
19146	スーパーマイルドグローブ	SS	無	2,000枚	100枚×20箱
19147		S			
19148		M			
19149		L			
19145		LL			

# ポリエチレングローブ

幅広い用途に使えるリーズナブルな使い捨てグローブ

## ポリエチレングローブ



PE強化

●薄くて強い、強化タイプ



PEエンボス

●着脱しやすいエンボスタイプ



PEフィット



ポリグローブ ロング

### PEフィット特徴

- 各指2カ所に絞り加工がしてあるためフィット性に優れ、作業中の脱落を防ぎます。
- 内側にエンボス加工を施している、左右兼用タイプのグローブです。
- 耐油性・耐薬品性に優れており、多目的にご使用いただけます。

絞り加工



商品コード	商品名	サイズ	入数	包装
19045	テキパキグローブ PE強化	S	8,000枚	400枚×20箱
19046		M		
19047	テキパキグローブ PEエンボス	S	4,000枚	100枚×40箱
19048		M		
19050	テキパキグローブ PEフィット	S	4,000枚	200枚×20箱
19051		M		
19052		L		
19060	ポリグローブ ロング	フリー	600枚	30枚×20箱

## テキパキグローブ PEソフトタイプ



- TPE（熱可塑性エラストマー）を配合したポリエチレン手袋です。従来のポリエチレン手袋より強度、伸びがあり、手指にフィットします。
- 手形を小さめ（当社比）にすることで指へのフィット感とグリップ力を高め、作業性を良くしました。PVC手袋の代替にもお勧めします。
- 個包装はコンパクトな箱包装なので、取り出しや保管がしやすくなっています。
- 内側にエンボス加工を施している、左右兼用タイプです。



商品コード	商品名	サイズ	色	入数	包装
19056	テキパキグローブ PEソフトタイプ	S	クリアー	6,000枚	200枚×30箱
19057		M			
19058		L			

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS GLOVE

## ニトリルグローブ/ラテックスグローブ

フィット性に優れた検査・検診用グローブ

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDNコード: 70976000)

### NS ハンドプロニトリルグローブ



- 優れた伸縮性とフィット感
- テープが貼り付きにくい
- 指先に滑り止め加工
- 耐薬品性により優れている
- ラテックスフリー&パウダーフリー



長さ	厚み	
	指先	掌部
240mm	0.05mm以上	0.05mm以上



### NS アルファニトリルグローブ



長さ	厚み	
	指先	掌部
240mm	0.05mm以上	0.05mm以上

### 抗がん剤耐性テスト (ASTM F739-07)

薬剤名		結果
メトトレキサート、25.0mg/ml (25,000ppm)	メトトレキサート、25.0mg/ml (25,000ppm)	240分まで透過せず
シスプラチン、1.0mg/ml (1,000ppm)	シスプラチン、1.0mg/ml (1,000ppm)	
シクロホスファミド、(Cytoxan) 20.0mg/ml (20,000ppm)	パクリタキセル、(Taxol)、6.0mg/ml (6,000ppm)	
ダカルバジン、(DTIC)、10.0mg/ml (10,000ppm)	硫酸ピンクリスチン、1.0mg/ml (1,000ppm)	
塩酸ドキシソルピシン、2.0mg/ml (2,000ppm)		

商品コード	商品名	サイズ	色	入数	包装
19251	NSハンドプロニトリルグローブ 届出番号: 13B3X00142000012	S	ライラックブルー	3,000枚	300枚×10箱
19252		M			
19253		L			
19180	NSアルファニトリルグローブ 届出番号: 13B3X00142000008	SS	ホワイト	2,000枚	200枚×10箱
19181		S			
19182		M			
19183	L				

# NSニトリルグローブ セミロング



長さ	厚み	
	指先	掌部
300mm	0.1mm以上	0.1mm以上

- ガウンの袖口もカバーできる長さ
- 厚手で強度にも優れている
- 耐薬品性により優れている
- 指先に滑り止め加工

## 抗がん剤耐性テスト (ASTM F739-07)

薬剤名		結果
メトトレキサート、25.0mg/ml (25,000ppm)	メトトレキサート、25.0mg/ml (25,000ppm)	240分まで透過せず
シスプラチン、1.0mg/ml (1,000ppm)	シスプラチン、1.0mg/ml (1,000ppm)	
シクロホスファミド、(Cytoxan) 20.0mg/ml (20,000ppm)	パクリタキセル、(Taxol)、6.0mg/ml (6,000ppm)	
ダカルバジン、(DTIC)、10.0mg/ml (10,000ppm)	硫酸ピンクリスチン、1.0mg/ml (1,000ppm)	
塩酸ドキシソルピシン、2.0mg/ml (2,000ppm)		

商品コード	商品名	サイズ	色	入数	包装
19191	NSニトリルグローブ セミロング 届出番号：13B3X00142000009	S	ブルー	1,000枚	100枚×10箱
19192		M			
19193		L			

# スーパーラテックスグローブ



長さ	厚み	
	指先	掌部
230mm	0.08mm以上	0.08mm以上

- 伸縮性に優れ、指先までよくフィットします
- 強度に優れ、長時間の作業に適しています
- 装着がし易くなるようポリマーコーティングされています
- サイズごとに色分けされた視認性の良いパッケージデザインとなっています

商品コード	商品名	サイズ	パウダー	入数	包装
19230	スーパーラテックスグローブ 届出番号：13B3X00142000003	SS	無	1,000枚	100枚×10箱
19231		S			
19232		M			
19233		L			

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# レントゲンカバーシリーズ

バリア性に優れた使い捨てレントゲンカバー



1. ポリエチレン素材を使用した、滅菌済の透明カバーです。
2. 血管造影室及び手術室でご使用されている機器を、汚染から守ります。
3. 患者様への交差感染を防ぎます。
4. 透明素材のため、機器操作の確認が容易です。



商品コード	商品名	仕様	サイズ	入数	包装
17207	アルファソフトカバー NA-070	ソフトゴムタイプ	直径70cm	100枚	20枚×5箱
17208	アルファソフトカバー NA-075	ソフトゴムタイプ	直径75cm	100枚	20枚×5箱
17209	アルファソフトカバー NA-070	ソフトゴムタイプ	直径85cm	100枚	20枚×5箱
17210	アルファソフトカバー NA-075	ソフトゴムタイプ	直径100cm	100枚	20枚×5箱
17212	アルファソフトカバー NA-070	ソフトゴムタイプ	直径120cm	100枚	20枚×5箱
17214	アルファソフトカバー NA-075	ソフトゴムタイプ	直径140cm	50枚	10枚×5箱
17215	アルファソフトカバー NA-070	ソフトゴムタイプ	直径150cm	50枚	10枚×5箱
17315	アルファソフトカバー NA-075	ソフトゴムタイプ	横75cm×縦85cm	100枚	20枚×5箱
17375	遮断板カバー	ソフトゴムタイプ	横75cm×縦95cm	100枚	20枚×5箱

販売元



〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
 ヒューリック神谷町ビル4階  
 TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
 (土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ





# ディスポトレシリーズ

感染対策と省力化に適したディスポトレシリーズ

## 膿盆

### パルプ製品

①

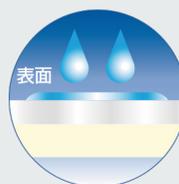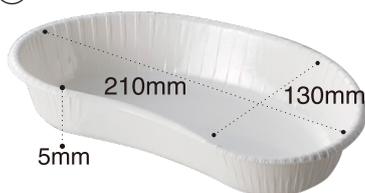

丈夫で軽量の天然パルプの表面に、特殊フィルム等による耐水加工仕上げが施されています

### プラスチック製品

②



③



- 1.従来のステンレス製品等のリサイクル使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。
- 2.ディスポ膿盆は丈夫で軽量の天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。
- 3.プラスチック膿盆はPPF（フィラー入りポリプロピレン）製のディスポタイプです。
- 4.オートクレーブ（AC）、エチレンオキサイドガス（EOG）滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。
- 5.処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。
- 6.廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。
- 7.プラスチック膿盆（大）は目盛付（500, 1000ml）

商品コード	商品名	サイズ (mm)	滅菌対応		耐水性	入数	包装
			AC	EOG			
13001	① ディスポ膿盆	210×130×35	○	○	○	600枚	100×6箱
13019	② プラスチック膿盆（小）	215×135×38	○	○	○	600枚	100×6袋
13020	③ プラスチック膿盆（大）	315×200×55	○	○	○	160枚	80×2袋

販売元

**nissho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# トレー

## パルプ製品



## プラスチック製品



商品コード	商品名	サイズ (mm)	滅菌対応		耐水性	入数	包装
			AC	EOG			
13002	① ディスポトレー L	225×145×30	○	○	○	500枚	100×5箱
13003	② ディスポトレー LL	312×207×30	○	○	○	400枚	100×4袋
13015	③ ディスポトレー D-1	180×135×30	○	○	○	200枚	100×2袋
13016	④ ディスポトレー D-2	225×150×30	○	○	○	200枚	100×2袋
13017	⑤ ディスポトレー D-3	290×180×30	○	○	○	200枚	100×2袋
13004	⑥ 歯科用トレー PCT-5	220×130×15	○	○	○	800枚	100×8袋
13011	⑦ クリーントレー CT-5	220×130×15	○	○	×	1,000枚	100×10袋
13025	⑧ ディスポトレー DMP-1	185×138×30	○	○	○	800枚	100×8袋
13026	⑨ ディスポトレー DMP-2	227×155×30	○	○	○	600枚	100×6袋
13027	⑩ ディスポトレー DMP-3	297×185×30	○	○	○	400枚	100×4袋

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ



# NS TOWEL

## ペーパータオルシリーズ

吸水性とコストパフォーマンスを重視

### ハンドタオル



※再生紙

### アルファタオル



※再生紙

厚手で拭き心地が良く、強度に優れたペーパータオルです。

薄手でしなやかさと強度を持ったペーパータオルです。

商品コード	商品名	仕様	入数	包装
51011	ハンドタオルS	170×220mm	42袋	200枚×42袋
51012	ハンドタオル レギュラー	220×230mm	35袋	200枚×35袋
51051	アルファタオルS	170×220mm	42袋	200枚×42袋
51052	アルファタオル レギュラー	220×230mm	35袋	200枚×35袋

### 抗菌ソフトタオル



※再生紙

### エコライトタオル



※再生紙

ソフトな肌ざわりと優れた吸水性に抗菌性をほどこした高品質2枚重ねタイプです。

コストパフォーマンスを追求した新感覚ペーパータオルです。

商品コード	商品名	仕様	入数	包装
51028	抗菌ソフトタオルS	170×220mm	48袋	2枚重150組×48袋
51029	抗菌ソフトタオル レギュラー	220×230mm	36袋	2枚重150組×48袋
51071	エコライトタオルS	170×220mm	40袋	200枚×40袋
51072	エコライトタオル レギュラー	220×230mm	30袋	200枚×30袋

# NSペーパータオルシリーズ用ディスペンサー

## スマートディスペンサー



大容量タイプと小容量タイプの2種類がございます。

- 側面部分が半透明となっており、タオル残量が一目で分かります。
- エッジを面取りした安全性に配慮した設計です。
- 付属品として、設置用両面テープ・ネジがあります。
- 清潔感がありモダンなデザインです。

商品コード	商品名	ケース入数	規格サイズ	JANコード
54410	NSスマートディスペンサー	1台×5箱	縦297×横244×幅130mm	4523992544100
54411	NSスマートディスペンサーS	1台×10箱	縦147×横240×幅87mm	4523992544117

※1台からの御販売も可能です。

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS STERILIZATION

## 滅菌バッグシリーズ (オートクレーブ/EOG滅菌対応)

優れた強度・ピール性・無菌性で滅菌作業をサポート



鉗子立用 NSKシリーズ

### 特徴

1. オートクレーブ滅菌とEOG滅菌の両方に使用できます。
2. 特殊抄造の滅菌紙と高度な耐熱フィルムを使用しています。
3. NSKシリーズは鉗子立用です。底に強化フィルムを使用しているため、鉗子等が突き抜けることはありません。
4. 全ての製品にインジケーターが付いています。



ロールタイプ・ガゼット付



ロールタイプ・フラット



スタンドタイプ

商品コード	商品名	仕様	入数	包装
11110	NSR-70 (ロールタイプ・ガゼット付)	70×30mm×100M	4巻	1巻×4箱
11111	NSR-100 (ロールタイプ・ガゼット付)	100×30mm×100M	4巻	1巻×4箱
11112	NSR-150 (ロールタイプ・ガゼット付)	150×50mm×100M	4巻	1巻×4箱
11113	NSR-200 (ロールタイプ・ガゼット付)	200×50mm×100M	2巻	1巻×2箱
11114	NSR-250 (ロールタイプ・ガゼット付)	250×60mm×100M	2巻	1巻×2箱
11115	NSR-300 (ロールタイプ・ガゼット付)	300×70mm×100M	2巻	1巻×2箱
11116	NSR-350 (ロールタイプ・ガゼット付)	350×70mm×100M	2巻	1巻×2箱
11117	NSR-420 (ロールタイプ・ガゼット付)	420×140mm×100M	1巻	1巻×1箱
11121	NSR-70F (ロールタイプ・フラット)	70mm×200M	4巻	1巻×4箱
11122	NSR-100F (ロールタイプ・フラット)	100mm×200M	4巻	1巻×4箱
11123	NSR-150F (ロールタイプ・フラット)	150mm×200M	4巻	1巻×4箱
11160	NSK-1225 (スタンドタイプ)	120×250mm	500枚	500枚×1箱
11161	NSK-1333 (スタンドタイプ)	130×330mm	500枚	500枚×1箱
11163	NSK-1530 (スタンドタイプ)	150×300mm	500枚	500枚×1箱
11165	NSK-1733 (スタンドタイプ)	170×330mm	500枚	500枚×1箱
11166	NSK-1737 (スタンドタイプ)	170×370mm	500枚	500枚×1箱

※上記以外の特注品対応も致しております。

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ


〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

NS  
CAPE

# メモリアルケープ

機能性に優れたプラスチック製ディスポーザブル洗髪用ケープ

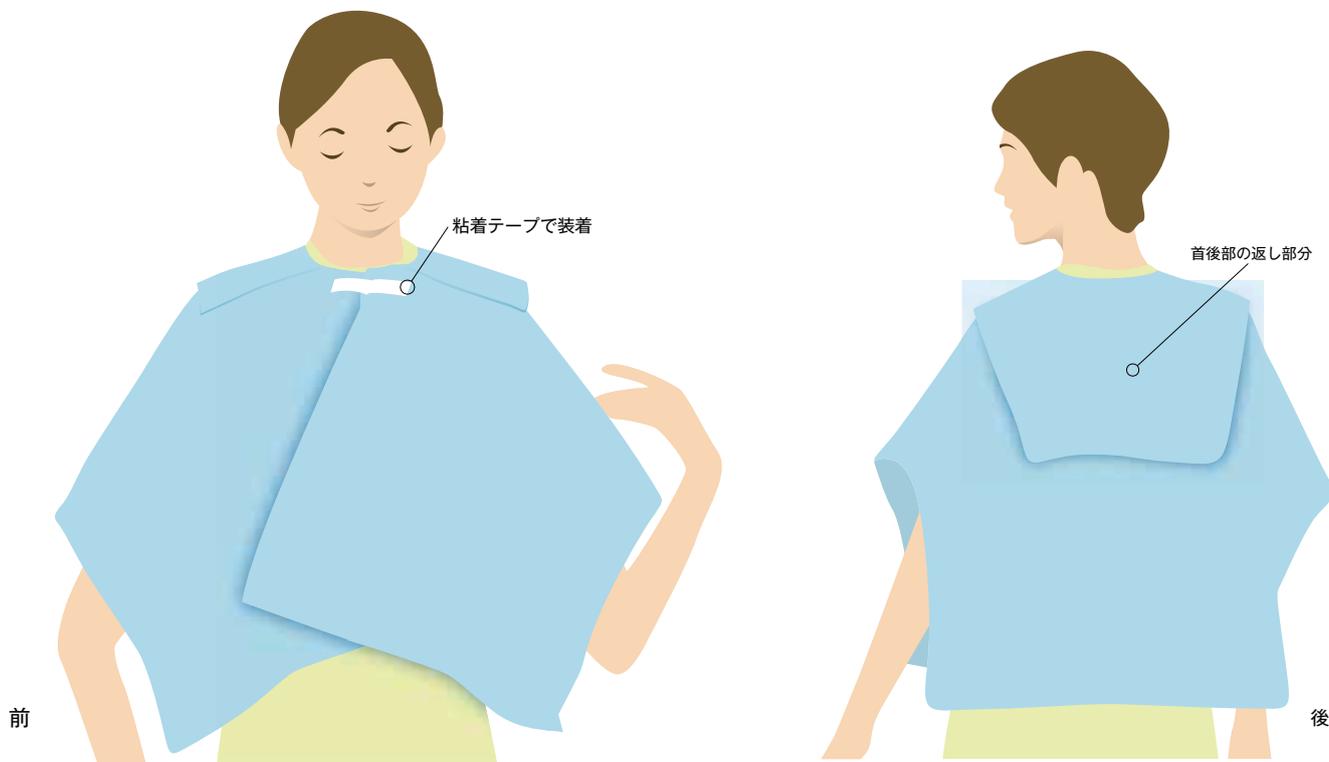

- 洗髪・カット時にご使用いただけるディスポーザブルケープです。
- 使い捨てタイプなので衛生的です。カビ・臭いなどの不快感がございません。
- 首後部の返しにより水濡れを防ぎます。
- 男性にも女性にも着用いただけるフリーサイズです。  
(着丈×幅=114×92cm)

※実用新案登録第3172227号



便利なチャック付き袋入り



洗髪車での  
使用イメージ

商品コード	商品名	仕様	入数	包装
51691	NSメモリアルケープ	ポリエチレン製	400枚	1枚/袋×10袋/袋×40袋

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS GAUZE

## ユニガーゼ

肌にやさしい、柔らかな不織布ガーゼです。



- 吸水性・保水性に優れております。
- 清拭や環境整備クロスとして幅広くご使用頂けます。
- AC・EOG滅菌が可能です。



商品コード	商品名	仕様	不織布寸法	入数	包装
31005	NSユニガーゼ 5×5	4ツ折	10cm×10cm	4,000枚	200枚×20包
31007	NSユニガーゼ 7.5×7.5	8ツ折	15cm×30cm	4,000枚	100枚×40包
31008	NSユニガーゼ 7.5×7.5 Yカット	8ツ折	15cm×30cm	4,000枚	100枚×40包
31025	NSユニガーゼ 25×25	4ツ折	25cm×25cm	4,000枚	200枚×20包
31030	NSユニガーゼ 30×30	4ツ折	30cm×30cm	4,000枚	200枚×20包
31050	NSユニガーゼ 25×25 箱入	4ツ折	25cm×25cm	4,000枚	200枚×20箱
31060	NSユニガーゼ 30×30 箱入	4ツ折	30cm×30cm	4,000枚	200枚×20箱

販売元

**nissho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ



## 清拭用タオルシリーズ

使いやすさと衛生面を追求したディスポーザブルタオル



- 1本ずつ包装されておりますので衛生的です。
- 用途に合わせたサイズ・材質をご用意しております。
- 肌が敏感な方でもご使用頂けるノンアルコールタイプです。
- 温めても冷やしてもご使用頂けます。



### [ご使用上の注意]

- ・タオルウォーマー（保温用機器 標準温度70～80℃）での使用は可能です。
- ・電子レンジで温める際には開封した状態で温めて下さい。
- ・温める際にはやけどにご注意下さい。
- ・水に溶けませんので、トイレには流さないで下さい。

商品コード	商品名	仕様	入数	材質	包装
51097	NS清拭用タオル ミニ	265×280mm	1,000本	パルプ	50本×20袋
51099	NS清拭用タオル	295×380mm	600本	パルプ	50本×12袋
51120	NS清拭用タオル-α ミニ	265×280mm	1,000本	レーヨン・ポリエステル	100本×10袋
51121	NS清拭用タオル-α	280×360mm	800本	レーヨン・ポリエステル	100本×8袋
51122	NS清拭用タオル-α ワイド	600×255mm	500本	レーヨン・ポリエステル	50×10袋
51119	NSウェットタオル ワイド	600×255mm	600本	レーヨン・ポリエステル	50本×12袋

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30～17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS APRON

## 食事用エプロン

使い捨てタイプの食事用エプロン



- 幅広サイズで食べこぼしや汚れから衣類を守ります。
- うすくて、やわらか、かさばらない生地を使用しました。
- えりぐりのサイズ調整はテープで簡単です。

使い捨て  
使用



商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
51632	使い捨て食事用エプロン	ピンク	70×110mm	840枚	70枚×12箱
51633		ブルー			

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS PAPER

## ワンタッチトイレトーパー



●片手で紙を引き出すことができます。



- 1枚ずつ引き出せるため次の紙が不潔にならず衛生的です。
- ロールタイプに比べて紙を引き出す際に音が静かです。
- 紙は3枚重ねです。
- 専用ディスペンサーには2束入ります。

商品コード	商品名	包装形態
51280	NSワンタッチトイレトーパー	150組×12束/袋×4袋
54415	NSワンタッチTPホルダー	10台/ケース

販売元


**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

# NS粘着吸水シート

手術室や医療現場の床面汚れを防止します

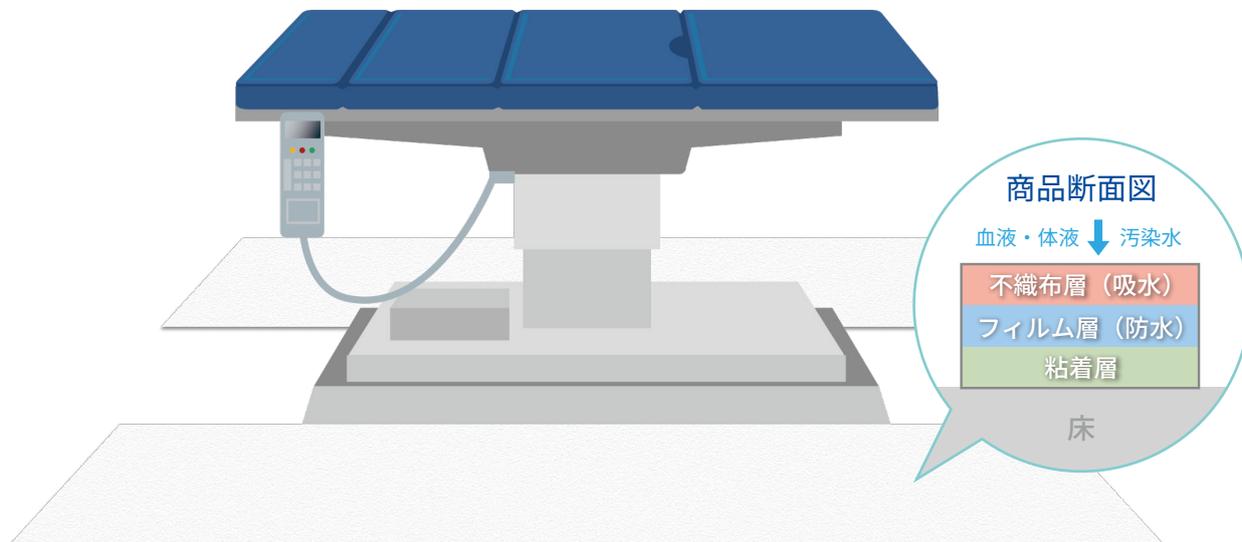

## 床に直接貼れる

- ・ 接地面に粘着性があり床に直接貼れます。
- ・ 固定用テープ不要なので作業性が向上します。
- ・ 使用後、シートを剥がしても床に跡が残りません。

## 吸水・防水機能で清潔

- ・ 表面の吸水性不織布で汚染水等をキャッチ。
- ・ 裏面に防水フィルムをラミネートしているので床面に水分を通しません。
- ・ 滑りやすい床にも表面の防滑機能で転倒防止対策が可能です。

## 用途に応じて好みのサイズに

- ・ ロール形状なので好みの長さにカットしてご使用頂けます。
- ・ 50cm幅と100cm幅をご用意していますので使用場所によって使い分けが可能です。

### [注意点]

- 床面の状態によって粘着しにくい場合がありますので、ほこり等を拭き取ってからご使用ください。
- ロール外側に粘着層があります。
- 保管方法につきましては製品に使用されている包装用フィルムで包装して、湿度の低い冷暗所で保管をお願い致します。


## シートの使用方法 [使用場所] 手術室、内視鏡室、カテ室、救急外来、洗い場 など



シートの粘着面を床に向け、広げたい場所に置き、シートの端を床に押し付けるように固定します。



シートを床に押し付けながらゆっくりと貼り付けてください。

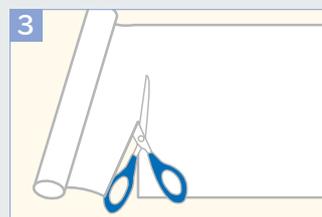

貼り付けてから、好みのサイズにハサミやカッターで切ってください。

商品コード	商品名	サイズ	包装形態
18320	NS 粘着吸水シート 50	50cm 幅×50M	2巻/箱
18321	NS 粘着吸水シート 100	100cm 幅×50M	1巻/箱

販売元

**issho**  
日昭産業株式会社  
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号  
ヒューリック神谷町ビル4階  
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680  
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ